

In Body 利用方法について

体重や体脂肪率、筋肉量等を計測する体組成計マシン「InBody」の管理アプリです。初回利用時に計測のご案内を行います。

1. アプリをダウンロード

※QRを読み込めない場合はInBodyを検索してください。




2. 電話番号とメールを入力したら、メールボックスを確認し認証を行ってください。



3. パスワード設定を行います。


※英大文字・小文字・数字・記号の中から3つ以上を組み合わせ8文字以上で設定

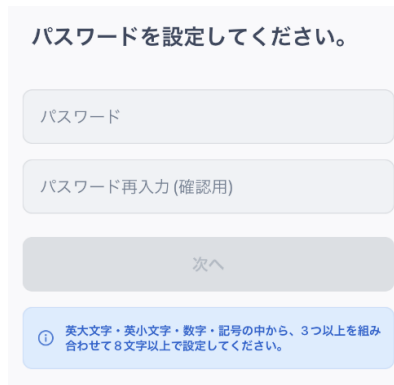

4. 生年月日、性別、身長を流れに沿って入力します。最後に同意にチェックをして登録完了です。



5. 登録するInBodyはその他>なし（業務用InBodyなど）を選択してください。

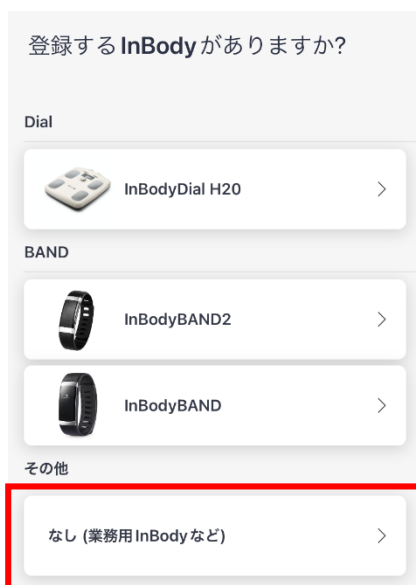

6. InBodyの計測結果は「InBody測定記録」を選択し「QR読み込み」より、アプリに取り込むことが可能です。※計測結果のQR読み込みは初回カウンセリング時にご案内します。

